

NOTATKA DORADCZA

Data wydania	29.03.2023	
Numer notatki	ND_2303_06	
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	Nazwa URIC ACID STANDARD 5	Numer katalogowy 5-125
Numer serii Data ważności	Seria XXX-66 XXX-67	Data ważności 2024-07 2025-04
Opis sytuacji		
<p>Podczas rutynowej kontroli jakości odczynnika uzyskano wyniki wykraczające poza wewnętrzne kryteria akceptacji. W celu rozwiązania problemu, w oparciu o wzorzec pierwszorzędowy, NIST Standard Reference Material 1950, ponownie wyznaczono wartość miana wzorca URIC ACID STANDARD 5 (Nr kat. 5-125). Nowe miano wzorca wynosi odpowiednio:</p>		
ODCZYNNIK	SERIA	MIANO WZORCA
URIC ACID STANDARD 5	XXX-66	4,70 mg/dl (279,56 µmol/l)
	XXX-67	4,74 mg/dl (281,94 µmol/l)
Konieczne działania		
<p>Należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> zapoznać się z treścią Notatki Doradczej i od momentu jej otrzymania stosować nowo wyznaczone wartości wzorca podczas wykonywania oznaczeń, przeprowadzić kalibrację i kontrolę jakości przed zlecaniem próbek pacjentów, odesłać wypełniony formularz weryfikacyjny <p>Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu!</p>		

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,