

NOTATKA DORADCZA

Data wydania	29.03.2023	
Numer notatki	ND_2303_07	
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	Nazwa GLUCOSE STANDARD 100	Numer katalogowy 5-121
Numer serii Data ważności	Seria XXX-58 XXX-59 XXX-60	Data ważności 2023-05 2024-11 2025-06
Opis sytuacji		
<p>Podczas rutynowej kontroli jakości odczynników uzyskano wyniki wykraczające poza wewnętrzne kryteria akceptacji. W celu rozwiązania problemu, w oparciu o wzorzec pierwszorzędowy, NIST Standard Reference Material 965b, ponownie wyznaczono wartość miana wzorca GLUCOSE STANDARD 100 (Nr kat. 5-121). Nowe miano wzorca wynosi odpowiednio:</p>		
ODCZYNNIK	SERIA	MIANO WZORCA
GLUCOSE STANDARD 100	XXX-58	91,5 mg/dl (5,08 mmol/l)
	XXX-59	91,1 mg/dl (5,06 mmol/l)
	XXX-60	94,3 mg/dl (5,23 mmol/l)
Konieczne działania		
<p>Należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> zapoznać się z treścią Notatki Doradczej i od momentu jej otrzymania stosować nowo wyznaczone wartości wzorca podczas wykonywania oznaczeń, przeprowadzić kalibrację i kontrolę jakości przed zlecaniem próbek pacjentów, odesłać wypełniony formularz weryfikacyjny <p>Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu!</p>		

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,