

NOTATKA DORADCZA

Data wydania	20.11.2023
Numer notatki	ND_2311_01
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	PRESTIGE 24i LQ CREATININE; Nr kat. 4-233, 4-433
Numer serii	wszystkie serie
Data ważności	n/d
Opis sytuacji	
<p style="text-align: center;">DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW ANALIZATORA <u>Biolis 24i Premium</u> !!!</p> <p>Podczas rutynowej kontroli jakości odczynnika uzyskano wyniki wykraczające poza wewnętrzne kryteria akceptacji. W celu rozwiązania problemu zoptymalizowano program aplikacji na analizator Biolis 24i Premium (Załącznik 1). Nowy program aplikacji znajduje się również w zaktualizowanej instrukcji użycia. Aktualna instrukcja użycia znajduje się na stronie internetowej – www.cormay.com.</p>	
Konieczne działania	
<p>Należy:</p> <ul style="list-style-type: none">• zapoznać się z treścią notatki doradczej,• zaktualizować aplikację na analizatorze przed wykonaniem oznaczenia (Załącznik 1),• przeprowadzić kalibrację i kontrolę jakości przed zleceniem próbek pacjentów,• odesłać wypełniony formularz weryfikacyjny. <p>Notatka ma charakter informacyjny. Nie należy niszczyć produktu!</p>	

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 665 371 525

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości