

## NOTATKA DORADCZA

Data wydania	11.03.2024
Numer notatki	ND_2403_01
Nazwa i numer katalogowy wyrobu	Myt-3D (Nr kat. MYT301, MYT302, MYT306N)
Numer serii	B0224
Data ważności	2024-05-05
Opis sytuacji	<p>Podczas monitorowania jakości krwi kontrolnej Myt-3D (poziom niski i normalny), podjęto decyzję o ponownym wyznaczeniu <b>wartości dla parametrów RDW, LY, MO oraz GR.</b></p> <p>Ponownie wyznaczone wartości dla powyższych parametrów zostały podane w karcie wartości wyznaczonych (Załącznik 1).</p> <p><b>Wartości pozostałych parametrów niewymienionych w notatce nie uległy zmianie.</b></p>
Konieczne działania	<p>Należy:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• zapoznać się z treścią notatki doradczej oraz kartą wartości wyznaczonych (Załącznik 1);</li><li>• <b>stosować nowo wyznaczone wartości RDW, LY, MO i GR podczas oznaczeń;</b></li><li>• przeprowadzić <b>kontrolę jakości</b> przed zleceniem próbek pacjentów,</li><li>• odesłać wypełniony <b>formularz weryfikacyjny.</b></li></ul> <p>Notatka ma charakter informacyjny. <b>Nie należy niszczyć produktu!</b></p>

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim Użytkownikom powyższego produktu oraz zachowanie Notatki doradczej jako dokumentacji systemu jakości.

Prosimy o wypełnienie i zwrot załączonego Formularza weryfikacyjnego, w celu potwierdzenia otrzymania powyższych informacji. W razie pytań prosimy o kontakt z pod numerem telefonu: 665 371 525

Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane powyższą sytuacją.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości